

ZATRZYMUJE KRWAWIENIE W KILKA SEKUND



VETIGEL® Weterynaryjny żel hemostatyczny o natychmiastowym działaniu

Korzyści dla klinik

- Skrócenie czasu zabiegu
- Przyspieszenie rekonwalescencji
- Zmniejszenie ryzyka powikłań u pacjentów z wcześniej istniejącymi schorzeniami
- Krótszy czas leczenia pacjenta
- Niższe koszty hemostazy

Korzyści dla pacjentów

- Zmniejszenie utraty krwi
- Skrócenie czasu znieczulenia
- Niższe ryzyko wstrząsu ogólnoustrojowego
- Uniknięcie ryzyka krwawienia pooperacyjnego
- Szybszy powrót zwierzęcia do właściciela

Do czego można stosować VETIGEL®?

VETIGEL® może być stosowany podczas wielu procedur weterynaryjnych między innymi takich jak: ekstrakcje zębów, usuwanie tkanek w obrębie jamy ustnej, usuwanie tkanek z jamy brzusznej i klatki piersiowej, biopsje narządów miękkich, enukleacje, kastracje i sterylizacje, amputacje, krwawienia żyłne i tętnicze, cholecysektomie, cewnikowanie i rany szarpane.

Produkty **VETIGEL®**



613394 **VETIGEL®** ŻEL
HEMOSTATYCZNY
1 X 5ML / VET-05 (1 szt.)



613284 **VETIGEL®** ŻEL
HEMOSTATYCZNY
2 X 5ML / VET-02 (2 szt.)



613500 **VETIGEL®** -
AKCESORIA, 2 KPL. (KPL
= 1 adapter + 2 precyzyjne
końcówki dozujące)

JAK UŻYWAĆ VETIGEL®




NAPEŁNIJ KOŃCÓWKĘ

Odkręć nasadkę strzykawki i napełnij ją powoli wciskając tłok aż żel dotrze do dyszy.



PRZYTRZYMAJ

Wprowadzić strzykawkę do najgłębszej części rany, trzymając prostopadłe do powierzchni skóry.

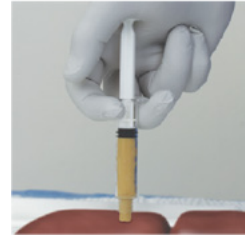


ZAAPLIKUJ

Gdy żel wypełni ubytek, powoli wycofaj strzykawkę, kontynuując wyciskanie żelu i pozwalając na utworzenie „grzybka” nad otaczającą tkanką.



ZAKOTWICZ

Ruchem wycierającym zakotwicz VETIGEL® w tkance, aby odcepił się od dyszy strzykawki.

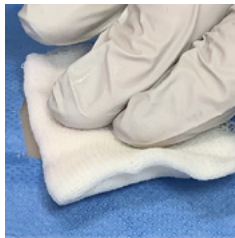

PRZYŁÓŻ GAZĘ

Zastosuj delikatny ucisk za pomocą mokrej gazy. Pomoże to utrzymać VETIGEL® na miejscu.

APLIKACJA Z PRECYZYJNYMI KOŃCÓWKAMI



PRZYKRĘĆ

Przymocuj białą końcówkę do strzykawki, następnie dodaj zieloną końcówkę z igłą. Upewnij się, że każdy element jest bezpiecznie zablokowany.



ZAAPLIKUJ


Użyj tej precyzyjnej końcówki aplikatora aby bezpiecznie dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

PRZYDATNE WSKAZÓWKI


- Napełnij końcówkę strzykawki przed użyciem
- Trzymaj strzykawkę prostopadle
- Wyciskaj produkt z jednakową siłą
- Pozwól, aby VETIGEL® pokrył otaczającą tkankę
- Używaj precyzyjnej końcówki przy zabiegach stomatologicznych lub w trudno dostępnych miejscach
- NIE stosować bez usunięcia nadmiaru krwi z miejsca aplikacji
- NIE wypełniaj zaczynając od zewnątrz do wewnątrz
- NIE wykonuj nadmiernego ucisku po aplikacji
- Pełne informacje można znaleźć w instrukcjach użytkowania




EKSTRAKCJE ZĘBÓW (10-15 ZĘBÓW)

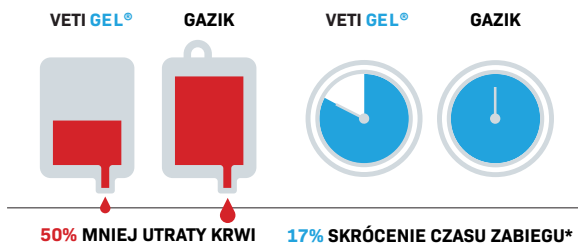

AMPUTACJE

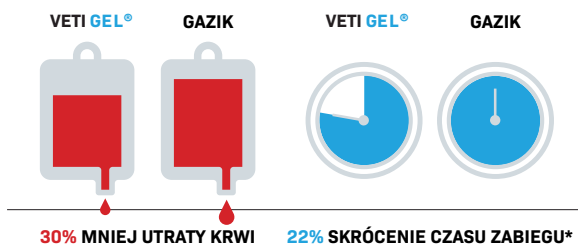

ENUKLEACJE

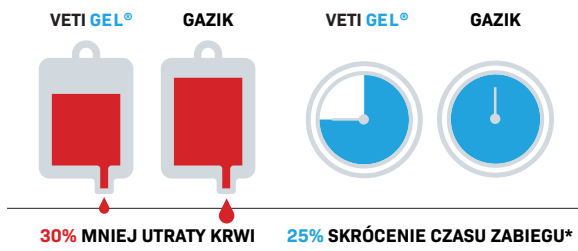

*Oszczędność czasu vs. standardowa procedura

Ekstrakcje zębów: 15 min | Amputacje: 20 min | Enukleacje: 5 min



DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE	VETIGEL® jest to hemostatyczny żel do użytku weterynaryjnego. Pomaga zatrzymać krwawienie u zwierząt w kilka sekund bez potrzeby ucisku.
PRODUKTY	VETIGEL® (brązowy, nieprzezroczysty, koloidalny hydrożel) w postaci 5 ml tubostrzykawkę zapakowanych w pojedyncze, sterylne saszetki. Dostępne na pojedyncze sztuki oraz w opakowaniach po 2 szt. W ofercie są również akcesoria z końcówkami do precyzyjnej aplikacji Vetigelu.
SKŁAD	VETIGEL® składa się ze specjalnej mieszanki polimerów roślinnych: alginianu sodu i poli (N-acetylo-D-glukozaminy, D-glukozaminy). Końcówka tubostrzykawki to gwint z łącznikiem Luer, wykonany z autoklawowalnej i biokompatybilnej żywicy nylonowej lub polipropylenowej. Precyzyjne akcesoria zawierają 2 adaptory oraz 4 igły dozujące ze stali nierdzewnej i polipropylenu, o tęym końcu zgiętym pod kątem 45 stopni z łącznikiem Luer.
MECHANIZM DZIAŁANIA	Roślinne polimery zawarte w VETIGEL® natychmiast zatrzymują krwawienie. Tworzą barierę mechaniczną w miejscu rany, wspieraną przez wiązania jonowe, które powodują, że nieporowaty żel przylega i nie integruje się ze skrzepem utworzonym przez organizm pacjenta.
INSTRUKCJA UŻYCIA	<ol style="list-style-type: none">Wyjąć jedną tubostrzykawkę VETIGEL® z saszetki.Napełnić tubostrzykawkę, powoli wciskając tłok, aż żel dotrze do końca strzykawki. Za pomocą sterylnej gazy wytrzeć nadmiar żelu wypływający z dyszy.Przygotować miejsce aplikacji poprzez zidentyfikowanie źródła krwawienia i usunięcie jak największej ilości krwi z miejsca przed aplikacją.Wypełnić ranę żelem, zaczynając od najgłębszej części i powoli wycofując strzykawkę w miarę wypełniania się miejsca. Pod koniec aplikacji żel należy ciągnąć w kierunku sąsiedniej tkanki ruchem wycierającym, aby upewnić się, że żel nie przywiera do końcówki.Przyłożyć gazik nawilżony solą fizjologiczną.
PRZECIWSKAZANIA I OSTRZEŻENIA	<p>PRZECIWSKAZANIA:</p> <p>Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu VETIGEL® do zabiegów okulistycznych nie zostały ustalone.</p> <p>Produkt VETIGEL® nie jest przeznaczony do stosowania w urządzeniach do zamykania ran.</p> <p>OSTRZEŻENIA:</p> <p>Nie stosować produktu VETIGEL® u koni z powodu nadwrażliwości na pirogeny.</p> <p>Nie wstrzykiwać produktu VETIGEL® wewnątrzznaczyniowo ze względu na ryzyko embolizacji.</p>
PRZECHOWYWANIE	VETIGEL® powinien być przechowywany w suchym miejscu w temperaturze 2°-25° C. Okres trwałości: 18 miesięcy. VETIGEL® nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie słońca.
WIĘCEJ INFORMACJI	Więcej informacji znajduje się w Instrukcji użycia.

Skontaktuj się ze swoim Doradcą Klienta lub z Biurem Obsługi Klienta MEDIVET
Zadzwoń i zamów: 801 00 25 25 | 61 622 55 55 lub zamów na www.medivet.pl