



# ROZWIERACZ BOAS DO ZABIEGÓW U RAS BRACHYCEFALICZNYCH/BOASMG

**Rozwieracz BOAS** firmy Vi został opracowany specjalnie dla chirurgów wykonujących operacje **BOAS**. **Unikalna konstrukcja** pozwala na znacznie lepszą wizualizację i dostęp chirurgiczny podczas tych zabiegów.

## SPECJALNE CECHY KONSTRUKCYJNE:

- **W pełni regulowana, odchylana podstawa**, która podtrzymuje górną część ciała pacjenta pod pożądanym kątem, aby zmaksymalizować widoczność i dostęp.
- Odchylana podstawa jest wsparta na nieruchomych prętach, aby zapewnić **doskonałą stabilność i optymalną nośność**.
- **Dwa regulowane poziome pręty** do utrzymywania otwartych szczęk pacjenta w pożądanej pozycji. Oba pręty są regulowane w górę/dół, a górny pręt jest również regulowany w przód/tył.
- Dostępne są **silikonowe nakładki** na pręty poziome, aby zminimalizować potencjalny uraz dziąseł pacjenta.
- **Umieszczony z przodu hak** umożliwia wywiązanie języka w razie potrzeby.
- **Dodatkowy hak podtrzymujący rurkę intubacyjną lub obwód anestetyczny**. Hak ten ma regulowaną wysokość i może być umieszczony z przodu lub z boku stojaka.

### KLUCZOWE CECHY:

- **Maks. szerokość głowy dla pacjenta:** 23,5 mm.
- **Maks. masa ciała pacjenta:** 40kg (zaleca się dodatkową ostrożność przy pozycjonowaniu głowy/szczęki pacjentów >25kg).
- **Powierzchnia podstawy:** 400mm x 500mm, wysokość w pełni zmontowana (z płaską podstawą): 470mm.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI PRODUKTU:

- Wypłukać letnią wodą natychmiast po użyciu.
- Czyszczenie ręczne przy użyciu odpowiedniej miękkiej, nie drapiącej szczotki do narzędzi oraz roztworu do czyszczenia narzędzi chirurgicznych o neutralnym pH.
- Po czyszczeniu dokładnie wypłukać w czystej bieżącej wodzie.
- Całkowicie wysuszyć urządzenie ręcznie, nie pozostawiać do wyschnięcia na powietrzu.
- Nasmarować, gdzie to konieczne, usuwając nadmiar smaru.
- Komponenty ramy BOAS mogą być poddane autoklawowaniu, jeśli jest to pożądane, pod warunkiem zachowania odpowiedniej przestrzeni w autoklawie.

| Nr kartoteki | Produkt   |
|--------------|---|
| 611192       | ROZWIERACZ BOAS DO ZABIEGÓW U RAS BRACHYCEFALICZNYCH / BOASMG |



BOASMG Info Sheet Issue 2 Nov 2022

Zamawiaj na [www.medivet.pl](http://www.medivet.pl)